

こんなときどうする？

● ボタンを押しても信号が緑色に変わらない

- ▶ もう一度ボタンを下までしっかりと押し、信号が緑色に変わったことを確認してから吸入してください。

● 何度もボタンを押してしまった

- ▶ ボタンを何度押しても、お薬が1回吸入分より多くセットされることはありません。安心してそのまま吸入してください。

● 吸入器を傾けて操作してしまった

● 吸入口に息を吹きかけてしまった

- ▶ 今回はそのまま吸入してください。ただし、適切な量の薬剤が吸入できない可能性があるため、次回から注意してください。

● ボタンを押したまま吸入してしまった

● 吸入しても信号が緑色のまま変わらない

- ▶ ボタンを押さずに、もう一度強く、深く吸入してください。信号が赤色に戻れば吸入は完了です。

● 吸入後、すぐにまたボタンを押してしまった

- ▶ 信号が緑色になってしまった場合は、次の吸入までお薬がこぼれないように保管し、次の吸入ではボタンを押さずにそのまま吸入してください。

エクリラ®の吸入器(ジェヌエア®)について

医療従事者向け

エクリラ®は**1回1吸入、1日2回**のお薬です。
朝・夕、毎日正しく使用してください。

■ 信号の色で正しく吸入できたことをお知らせします。



■ 「赤色の線」で再受診をお知らせします。

薬剤の残量を表示するカウター(10回刻み)

30吸入用 30 20 10 0
60吸入用 60 50 40 30 20 10 0



ボタンを下までしっかりと押しごとに少しずつ左に動きます。
なお、カウターは薬剤残量の目安です。

■ 最後の吸入をお知らせします。

カウターの中央に「0」が表示されると、ボタンが押されたままロックされます。
なお、この状態で最後の1吸入ができます。



エクリラ®の吸入方法

ご注意いただきたいこと

吸入 準備

キャップ両側の矢印部分を軽く押して引っ張り、外します。



- 全ての操作は、ボタンを上にして吸入器を水平に持って行いましょう。
- 吸入前に、吸入器を振る必要はありません。
- ボタンは吸入直前に押しましょう。



吸入 方法

ステップ 1 ボタンを押して離す

① 吸入器を水平に持ち、ボタンを下までしっかりと押して離します。



ボタンを押すと信号が赤色から緑色に変わります。

- ボタンは押したら離しましょう。
- 使用する時は信号の色を確認しましょう。



ステップ 2 吸入する


② しっかり息を吐いてから、吸入口を軽くかんで唇で包むように深くくわえ、強く深く吸い込みます。



「カチッ」という音が出て、信号が緑色から赤色へ戻ります。

③ 吸入口から口を離し、3～5秒程度(苦しくない程度)息を止めてから、ゆっくりと息を吐きます。

- 吸入口に息を吹きかけないようにしましょう。①
- 吸入口と唇の間に隙間がないようにご注意ください。②
- ボタンを押したまま吸入しないでください。③
- 肺にお薬を届けるため、「カチッ」と音がした後も、最後まで息を吸いきりましょう。

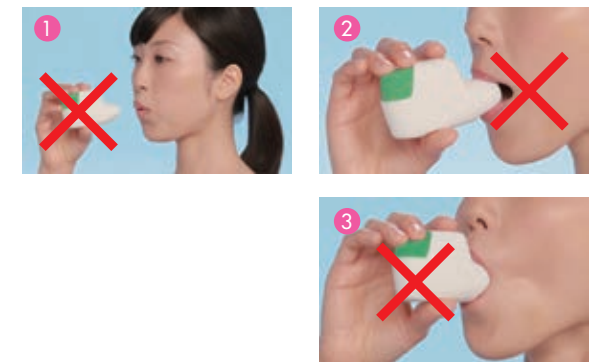

吸入 終了後

- 吸入が終わったら、キャップを付けて室温で保管してください。
- 患者さんによっては甘みや苦みを感じる場合があります。のどや口の中に残った薬剤が気になる方はうがいをしてください。

- 直射日光の当たる場所、冷蔵庫・冷凍庫で保管しないでください。
- 吸入器に水をかけないようにご注意ください。
- 汚れが気になる時は、乾いた清潔な布やティッシュで拭いてください。