

フルティフォーム®をお使いになる患者さんへ

フルティフォーム®用吸入トレーナーは  
フルティフォーム®の吸入方法を  
練習するための器具です。

吸入トレーナー  
(フルプッシュ®\*装着時)  
\*噴霧補助具



フルティフォーム®  
(フルプッシュ®装着時)




※吸入トレーナーに薬剤は含まれておりません。

使い方の動画はこちら▶



フルプッシュ®の装着方法

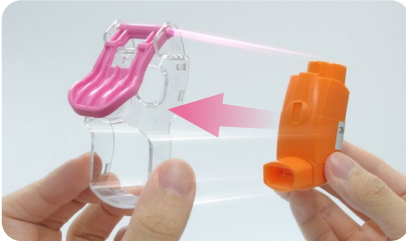

写真のように、吸入トレーナーをフルプッシュ®の後ろ側から差し込みます。カチッと音がするまで確実に装着してください。

## 吸入トレーナーを使った吸入練習方法

フルプッシュ® (噴霧補助具) を装着しています。



吸入器をよく振り、軽く息を吐きます。



吸入口を軽く歯でくわえ、  
レバーを押し、3秒くらいかけて  
ゆっくり深く吸い込みます。



ゆっくり吸入すると、  
音がなります。

注意：処方されたお薬（フルティフォーム®）を吸入しても  
笛の音はなりません。



吸入がはやかったり、強く吸いすぎると、  
音はなりません。  
音になるように吸入してください。

フルティフォーム®も  
ゆっくり深く吸いましょう。

